

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Організація – розробник: ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України» за участю ТОВ «Лізоформ Медікал» (Україна).


Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з проведення дезінфекції.

Місцевим закладам охорони здоров'я дозволяється тиражування цих методичних вказівок у необхідній кількості екземплярів з дозволу організації-розробника.

Із затвердженням цих Методичних вказівок втрачають силу Методичні вказівки щодо застосування «Бланідас Актив (Blanidas® Active)» з метою дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації, затверджені МОЗ України: № 5-2010 від 09.02.2010 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо застосування засобу «Бланідас Актив (Blanidas® Active)»
з метою дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації

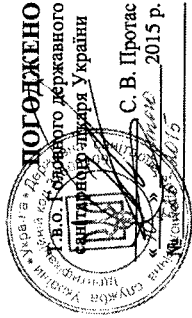

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо застосування засобу «Бланідас Актив (Blavidas® Active)» з метою дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. **Повна назва засобу** - засіб дезінфікуючий «Бланідас Актив (Blavidas® Active)».
- 1.2. **Виробник** - ТОВ "Лізоформ Медкал" (Україна) за ТУ У 24.2-33147971-001:2008.
- 1.3. **Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %:**
додецилпропілсульфат (1,3-пропандіамін) – 15,0-20,0, алкілдиметилбензиламоній хлорид – 10,0-15,0 (діючі речовини), поверхнево-активні речовини, інгібітори корозії, вода очищена - до 100,0.

1.4. **Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу.** Засіб «Бланідас Актив (Blavidas® Active)» являє собою однорідну прозору концентровану рідину зі слабким характерним запахом, яка добре розчиняється у воді. Водні розчини засобу прозорі, майже без кольору та без запаху, показник активності іонів водню рН 1,0 % водного розчину становить 7,5-10. Робочі розчини засобу мають гарні миючі (миюча здатність не менше 85%), дезодоруючі, змочувальні, емульгуючі властивості, не викликають корозії металів, не пошкоджують об'єкти, що виготовлені із корозійностійких і нестійких до корозії металів, термостабільних і термолабільних матеріалів, скла, гуми, каучуку, штучної шкіри, полімерних матеріалів, латексу, вітону, тефлону, поліаміду, макролону, полістиролу, поліетилену, м'якого та твердого полівінілхлориду, плексигласу (акрилового скла), поліфібру, силікону, альгінату, гідроксиду, дерева, кахлю, порцеляни, фаянсу та поверхні медичних приладів і устаткування з лакофарбовим, гальванічним і полімерним покриттям, не знебарвлюють і не зменшують міцність тканин, не фіксують забруднення органічного походження на поверхні виробів медичного призначення, добре змиваються, не залишають нальоту і плям на поверхнях об'єктів, що піддаються обробці. Видаляють механічні, білкові, жирові забруднення, залишки крові, залишки лікарських засобів із зовнішніх поверхонь, внутрішніх каналів та порожнин виробів медичного призначення, гомогенізують микротилина та інші виділення.

Засіб не сумісний з аніонними поверхнево-активними речовинами та милами.

- 1.5. **Призначення засобу.** Засіб «Бланідас Актив (Blavidas® Active)» призначений для проведення поточної, заключної, профілактичної дезінфекції та генеральних прибирань при збудниках внутрішньолікарняних інфекцій, інфекцій бактеріальної (включаючи туберкульоз, безпечні та особливо небезпечні інфекції: чума, туляремія, черевний тиф, холера, клостриді, легіонельоз; *Listeria monocytogenes*, *P.aeruginosa* (Antibiotic resistant), *E.hirae*, *S.aureus*, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеоморфна кишкова паличка (*Escherichia coli*), сальмонели, *Neisseria meningitidis*), вірусної (включаючи гепатит А, парентеральні віруси гепатити (В, С), вірус СНІД (HIV), герпес, грип, паратиф, вірус «пташиного грипу» А(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), рога, поліо- (поліомієліт), корона-, папова-, ентеровіруси, хантавіруси, вакциновірус, аденовірус, вірус Avian influenza, вірус Ебола) і грибової (кандидози, дерматомикози, плісняві грибки)

етіології, спорах (*B.subtilis*, *B.anthracoisides*, сибірка) у вогнищах інфекційних захворювань, закладах охорони здоров'я і лікувально-профілактичних закладах усіх профілів, у тому числі дитячих і денних стаціонарах, відділеннях неонатології, палатах, блоках і відділеннях інтенсивної терапії для новонароджених, маніпуляційних, операційних, перев'язувальних кабінетах, хірургічних, терапевтичних, педіатричних, акушерських, гінекологічних, офтальмологічних, фізіотерапевтичних відділень лікувально-профілактичних закладів, полігону будинках, поліклініках, стоматологічних клініках і кабінетах, шпиталях, амбулаторіях, диспансерах, фельдшерських і фельдшерсько-акушерських пунктах, центрах з трансплантації органів, медсанчастинах і медпунктах, станціях швидкої медичної допомоги, донорських пунктах, відділеннях переливання крові, карети швидкої медичної допомоги, патолого-анатомічних відділень, санаторіях, профлакторіях, реабілітаційних центрах, хоспісах, закладах соціального захисту населення, санпропускниках, закладах судово-медичної експертизи, медичних профільних центрах, клінічних, мікробіологічних, біохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, серологічних та інші профільних діагностичних лабораторіях тощо;

для дезінфекції, суміщення процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення (ручним і механізованим способом в установках ультразвукового очищення) і стерилізації усіх видів виробів медичного призначення з різних матеріалів одноразового і багаторазового призначення; гнучкі і жорсткі ендоскопи (що застосовуються для бронхоскопії, ларингоскопії, гістероскопії, гастроскопії, колоноскопії, ехоскопії, артроскопії, лапароскопії) та інструменти до них, хірургічні (в тому числі мікрохірургічні), гінекологічні, стоматологічні інструменти (у тому числі гіравалічні контури для стоматологічних вузлів, ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтиски ложки), стоматологічні матеріали (в тому числі відтиски з альгінату, силікону, поліефірної смоли, зубопротезні заготовки, зіпкі, мости, коронки, артикулятори тощо), зонди усіх видів, катетери, головки ультразвукових діагностичних апаратів, інстраопераційні та екокардіографічні датчики, термочутливі матеріали для анестезії, в тому числі маски, гнучкі та жорсткі трубки, катетери, шланги до наркозно-дихальної апаратури;

для дезінфекції високого рівня ендоскопів;

для достерилізаційного очищення усіх видів виробів медичного призначення з різних матеріалів та медичного інструментарію, включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них;

для дезінфекції кузовів у відділеннях неонатології;

для дезінфекції, суміщення процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення, а також стерилізації перукарського, манікюрного, педикюрного, косметичного інструментарію і приладдя на підприємствах сфери обслуговування;

для подання дезінфекції і одночасного миття поверхонь приміщень (підлога, стіни, двері, підвіконня тощо), меблів, предметів обстановки, медичних приладів, апаратів і устаткування (в тому числі особливо чутливих приладів і апаратів наркозно-дихального апаратури, хірургічно-реанімаційних моніторів пацієнта, датчиків до апаратів ультразвукового обстеження, рентгендіагностичних систем і комплексів, радіологічного і цифрового обладнання для діагностики, обладнання для комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, ангиографічних систем, обладнання для ультразвукової діагностики тощо), предметів догляду хворих (підкладні судна, гумові грінки, міхури для льоду, клейонки тощо), термометрів, тонометрів, засобів гігієни, лабораторного, столового, кухонного, аптечного посуду (у тому числі одноразово використані), білизни, взівок для складання і транспортування білизни, тари, стелажів для зберігання білизни, іграшок, санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю, гумових килимків тощо;

для дезінфекції і миття слизовіскоктуючих установок, шлювальниць та ін. в стоматологічних клініках і кабінетах;

для дезінфекції стезивуєт (використання в килимках для дезінфекції) перед входом в «критичні зони» лікувально-профілактичних та інших закладів і підприємств;

для знезараження перед утилізацією використаних виробів медичного призначення одноразового використання, медичних відходів з текстильних матеріалів (в тому числі перев'язувальний матеріал, ватяні тампони, серветки тощо), одноразової білизни, біологічних рідин (кров, плазма, слиз, мокротиння, слина тощо), посуду з-під відливу;

для дезінфекції повітря способом розпилення на різних об'єктах, знезараження систем вентиляції і кондиціонування повітря (побутові кондиціонери, спліт-системи, мультизональні спліт-системи та ін.);

для дезінфекції і миття сміттєпроводів, контейнерів та інших місткостей для сміття;

для дезінфекції і миття технологічного обладнання та устаткування в харчовій, фармацевтичній, мікробіологічній, біотехнологічній, парфумерно-косметичній промисловості;

для проведення поточної, заключної, профілактичної дезінфекції і генеральних прибирань;

в закладах охорони здоров'я і лікувально-профілактичних закладах, зазначених вище;

в лабораторіях різних підпорядкувань;

в аптечних закладах (аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, аптечні склади тощо);

в оздоровчих закладах для дорослих і дітей (будинки відпочинку, санаторії, профілакторії, в тому числі кабінети функціональної діагностики, фізіотерапії, бальнеологічні, будинки пристарілих тощо);

у навчально-виховних та учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих дошкільних закладах;

у військових частинах;

в установах пенітенціарної системи;

на підприємствах парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчопереробної промисловості (пекарні, кондитерські фабрики, молокозаводи, м'ясопереробні заводи);

в закладах ресторанного господарства і торгівлі (дальні, ресторани, роздаточні лінії, магазини, ринки тощо);

на рухомому складі та об'єктах забезпечення всіх видів транспорту (в тому числі санітарному транспорту, каретах швидкої медичної допомоги, громадському, залізничному, морському, річковому, автомобільному, повітряному транспорту), вокзалах, аеропортах тощо;

в спортивно-оздоровчих установах (спорткомплекси, басейни тощо), а також місцях проведення тренувань, змагань, учбово-тренувальних зборів, громадські ілжі;

на об'єктах комунально-побутового обслуговування (готелі, кемпінги, гуртожитки, перукарні, салони краси, SPA-центри, манікюрні, педикюрні, косметологічні клініки, салони, кабінети, солярії, лазні, сауни, пральні, хімчистки тощо);

у закладах сфери відпочинку та розваг (кінотеатри, театри, культурно-оздоровчі комплекси тощо);

у закладах та установах соціального захисту, пенітенціарних установах, хоспісах, закладах зв'язку та банківських установах, у домашніх умовах (квартири, приватні будинки);

громадських туалетах, біотуалетах тощо;

заводах, фабриках, складах та сховищах, вкляюючи паперові архіви, бібліотеки сховища, приміщення для зберігання зерна, продуктів харчування, лікарських засобів, предметів гігієни, сільськогосподарських об'єктах тощо;

для дезінфекції на інших епідемічно-значимих об'єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт у відповідності до діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил, нормативно-методичних документів.

1.6. Специфічні біологічні властивості засобу: спектр антимікробної дії. Засіб дезінфікуючий «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» має активність по відношенню до збудників внутрішньолікарняних інфекцій, інфекцій бактеріальної етіології (вкляюючи туберкульоз, безпечні та особливо небезпечні інфекції: чума, туляремія, черевний тиф, холера, клостриді, легіонельоз; *Listeria monocytogenes*, *P.aeruginosa* (Antibiotic resistant), *E.coli*, *S.aureus* та *S.aureus* Methicillin Resistant, мультирезистентний стафілокок (MRSA),

ентерогеомарганічна кишкова паличка (*Escherichia coli*), сальмонели, *Helicobacter pylori*), інфекцій вірусної етіології (вкляюючи гепатит А, парентеральні віруси гепатити (В, С), вірус СНІД (ВІЛ), герпес, грип, паратрип, вірус «пташиного грипу» А(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), рога-, поліо-(поліомієліт), корона-, папова-, ентеровіруси, хантавіруси, вакцинні віруси, аденовіруси, вірус Avian influenza, вірус Ебола), інфекцій грибової етіології (кандидози, дерматомікози, плісняві грибки), має споридні властивості (*B.subtilis*, *B.anthracois*, сибірка).

1.7. Токсичність та безпечність засобу. Засіб дезінфікуючий «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» за параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок належить до 3 класу помірно небезпечних речовин, в умовах інгалаційного впливу (у вигляді пари) та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу малонебезпечних речовин. У рекомендованих з метою дезінфекції концентраціях не виявляє шкірно-подразнювальних властивостей, не подразнює слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів. Не спричиняє шкірно-резорбтивної та сенсibiliзуючої дії. Не виявляє мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних, канцерогенних та гонадотропних властивостей.

2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

2.1. Методика та умови приготування робочих розчинів. Робочі розчини засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» (далі розчини) готують у промаркованому скляному, емальованому (без пошкодження емалі), пластмасовому посуді або посуді з будь-якого іншого матеріалу шляхом розчинення відповідної кількості концентрату у водопровідній воді кімнатної температури.

2.2. Розрахунки для приготування робочих розчинів. Для приготування розчинів засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» відповідної концентрації виходять із наступних розрахунків (табл. 1).

Таблиця 1. Приготування робочих розчинів засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)»

Концентрація, % (за препаратом)	Кількість інгредієнтів, необхідна для приготування		
	Лі розчину		10л розчину
	Об'єм засобу, мл	Об'єм води, мл	Об'єм засобу, мл
0,025	0,25	999,75	2,5
0,02	0,2	999,8	2,0
0,05	0,5	999,5	5,0
0,1	1,0	999,0	10,0
0,2	2,0	998,0	20,0
0,25	2,5	997,5	25,0
0,3	3,0	997,0	30,0
0,5	5,0	995,0	50,0
1,0	10,0	990,0	100,0
2,5	25,0	975,0	250,0
4,0	40,0	960,0	400,0
5,0	50,0	950,0	500,0

2.3. Термін та умови зберігання робочого розчину. Термін придатності робочих розчинів засобу – 16 діб за умови зберігання у тарі зі щільно закритою кришкою.

3. СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ, СУМІЩЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕЗІНФЕКЦІЇ І ДОСТЕРІЛІЗАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ, ДОСТЕРІЛІЗАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ТА СТЕРІЛІЗАЦІЇ

3.1. Об'єкти застосування. Засіб дезінфікуючий «Бланідас Актив (Blanidas®Active)» застосовують для дезінфекції, суміщення процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення (ручним і механізованим способом в установках ультразвукового очищення) і стерилізації усіх видів виробів медичного призначення з різних матеріалів одноразового і багаторазового призначення, гнучкі і жорсткі ендоскопі, колоноскопі, ехо-ендоскопі, бронхоскопі, ларингоскопі, гістроскопі, гастроскопі, ехо-ендоскопі, артроскопі, лапароскопі) та інструменти до них, хірургічні (в тому числі мікрохірургічні), гінекологічні, стоматологічні інструменти (у тому числі гідрравлічні контури для стоматологічних вузлів, ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки), стоматологічні матеріали (в тому числі відтискні з альгілату, силікону, поліефірної смоли, зубопротезні заготовки, заплік, мости, коронки, артикулятор тощо), зонди усіх видів, катетери, головки ультразвукових діагностичних апаратів, інстраопераційні та ехокардіографічні датчики, термочутливі матеріали для анестезії, в тому числі маски, гнучкі та жорсткі трубки, катетери, шланта до наркозно-дыхальної апаратури, хірургічно-реанімаційні моніторів пацієнта; для дезінфекції високого рівня ендоскопів; для достерилізаційного очищення усіх видів виробів медичного призначення з різних матеріалів та медичного інструментарію, гнучкі та жорсткі ендоскопі та інструменти до них; для дезінфекції кузовів у відділеннях неонатології; для дезінфекції, суміщення процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення, а також стерилізації перукарського, манікюрного, педикюрного, косметичного інструментарію і приладдя на підприємствах сфери обслуговування; для послання дезінфекції і одночасного миття поверхонь приміщень (підлога, стіни, двері, підвіконня тощо), меблів, предметів обстановки, медичних приладів, апаратів і устаткування (в тому числі особливо чутливих приладів і апаратів наркозно-дыхальної апаратури, датчиків до апаратів ультразвукового обстеження, рентгендіагностичних систем і комплексів, радіологічного і цифрового обладнання для діагностики, обладнання для комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, ангіографічних систем, обладнання для ультразвукової діагностики тощо), предметів догляду хворих (підкладні судна, гумові грінки, міхури для льоду, клейонки тощо), термометрів, засобів гігієни, лабораторного, столового, кухонного, аптечного посуду (у тому числі одноразового використання), білізани, візків для складання і транспортування білізани, тари, стелажів для зберігання білізани, іграшок, санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю, гумових килимків тощо; для дезінфекції і миття слиновидомоктучих установок, плювальниць та ін. в стоматологічних клініках і кабінетах; для дезінфекції спецшвизитів (використання в килимках для дезінфекції) перед входом в «критичні зони» лікувально-профілактичних та інших закладів і підприємств; для знезараження перед утилізацією використаних виробів медичного призначення одноразового використання, медичних відходів з текстильних матеріалів (в тому числі перев'язувальний матеріал, ватяні тампони, серветки тощо), одноразової білізани, біологічних рідин (кров, плазма, сліз, мокротиння, сліна тощо), посуду з-під виділення; для дезінфекції повітря способом розпилення на різних об'єктах, знезараження систем вентиляції і кондиціонування повітря (побутові кондиционери, спліт-системи, мультизональні спліт-системи та ін.); для дезінфекції і миття сміттєпроводів, контейнерів та інших місткостей для сміття; для дезінфекції і миття санітарного транспорту, карет швидкої медичної допомоги, технологічного обладнання та устаткування в харчовій, фармацевтичній, мікробіологічній, біотехнологічній, парфумерно-косметичній промисловості, транспортних засобів, обладнання та інвентарю комунально-побутового обслуговування та інших об'єктів при інфекціях, зазначених в п.1.6.

3.2. Методи знезараження окремих об'єктів. Дезінфекцію здійснюють способами протирання, зрошення, занурення, замочування у відповідності з режимами, наведеними в таблицях 2-6.

3.2.1. Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо), предмети обстановки (тверді меблі тощо) зрошують або протирають ганчір'ям, яке змочене розчином засобу. М'які меблі дезінфікують за допомогою шітки, змоченої розчином. Норма витрати робочого розчину засобу складає 100 мл/м².

Дезінфекцію поверхонь засобом «Бланідас Актив (Blanidas®Active)» також проводять методом «двох відер» за допомогою устаткування «Вермоп» (Німеччина) при витраті робочого розчину засобу 15 мл/м² поверхні, що піддається обробці, згідно технології прибирання і дезінфекції «Вермоп» (Німеччина).

Дезінфекцію поверхонь засобом «Бланідас Актив (Blanidas®Active)» також проводять методом розпилення за допомогою туманогенератора при витраті 30 мл робочого розчину на 1 м² площі оброблюваної поверхні.

Після дезінфекції розчином засобу «Бланідас Актив (Blanidas®Active)» має місце залишка (продовгована) антимікробна дія. Допускається не проводити вологе прибирання поверхонь після закінчення часу експозиції.

3.2.2. Поверхні медичних апаратів, приладів та устаткування (в тому числі особливо чутливих приладів і апаратів наркозно-дыхальної апаратури, хірургічно-реанімаційних моніторів пацієнта, датчиків до апаратів ультразвукового обстеження, рентгендіагностичні системи і комплекси, радіологічне і цифрове обладнання для діагностики, обладнання для комп'ютерної томографії, ангіографічні системи, обладнання для ультразвукової діагностики тощо) протирають ганчір'ям, що змочене розчином засобу, з наступним дотриманням відповідної експозиції.

3.2.3. Дезінфекцію кузовів для недоношених дітей проводять розчином засобу «Бланідас Актив (Blanidas®Active)» відповідно до методики дезінфекційної обробки кузовів. Норма витрати засобу на обробку кузова складає 100 мл/м² поверхні. Після обробки закривають камеру на відповідний час експозиції (табл. 2-6). Після експозиції відкривають камеру, і усі внутрішні поверхні ретельно протирають чистим ганчір'ям, ясно змоченим у воді, а потім витирають насухо. При обробці кузовів необхідно враховувати рекомендації виробника кузовів.

Пристрої у вигляді резервуару зволожувача, металевого хвилегасника, повітрязбірних трубок, шлангів, вузлів підготовки кисню повинні занурюють у ємність з робочим розчином засобу відповідної концентрації (табл. 2-6) По закінченню дезінфекції всі пристрої промивають шляхом дворазового занурення у дистильовану воду по 3 хв. кожне, прокачують воду через трубки і шланги. Пристосування висушують за допомогою чистих тканинних серветок.

3.2.4. Предмети догляду хворих (гумові грінки, міхури для льоду, термометри, клейонки тощо), засоби гігієни повинні занурюють у розчин засобу або протирають їх ганчір'ям, змоченим розчином засобу, чи зрошують розчином. Після закінчення дезінфекції їх промивають водою.

3.2.5. Посуд звільняють від залишків їжі і занурюють у розчин засобу із розрахунку 2 л на 1 комплект (глибока та мілка тарілки, чашка, блюде, столова і чайна ложки, виделка, ніж). Лабораторний або аптечний посуд занурюють у розчин засобу. Після закінчення дезінфекції посуд промивають водою. Посуд одноразового використання після знезараження утилізують.

3.2.6. Залишки їжі заливають розчином у співвідношенні об'ємів розчину та залишків 2:1. Після закінчення дезінфекції утилізують.

3.2.7. Предмети для миття посуду занурюють у розчин засобу. По закінченню дезінфекції їх споласкують водою.

3.2.8. Невеликі за розмірами іграшки повинні занурюють у місткість із розчином засобу, великі іграшки протирають ганчір'ям, змоченим розчином засобу, м'які іграшки чистять шіткою, яку змочують розчином. По закінченню дезінфекції іграшки промивають водою і висушують.

3.2.9. Близню замочують у розчин засобу із розрахунку 4 л на 1 кг сухої близни. Місткість із замоченою у розчині близною щільно закривають кришкою. Після дезінфекції близню перуть і полощуть.

Засіб «Бланідас Актив (Blanidas® Active)» також використовується для дезінфекції близни в процесі прання у пральних машинах. Засіб подається у вигляді робочого розчину, приготовленого централизованно, або в концентрованому вигляді. Норма витрат засобу визначається видом інфекцій, при яких проводиться обробка близни.

3.2.10. Візки для складання і транспортування близни, відповідну тару, стелажі, де зберігається близна, змочують або протирають ганчір'ям, яке змочене розчином засобу, з наступним дотриманням відповідної експозиції. Мішки для брудної близни дезінфікують шляхом замочування у місткості з робочим розчином засобу. Місткість щільно закривають кришкою. Після дезінфекції мішки поплівають і висушують. За необхідності подають на прання.

3.2.11. Поверхні санітарно-технічного обладнання (ванни, раковини, унітази, душові тощо) змочують розчином засобу або протирають ганчір'ям, яке змочене розчином засобу. Після дезінфекції об'єкти можна не протирати від залишків засобу.

Дезінфекцію ванн засобом «Бланідас Актив (Blanidas® Active)» також проводять за допомогою мопу-рукавички типу «Вермоп» (Німеччина) при витраті робочого розчину засобу 15 мл/м² поверхні, що піддається обробці, згідно технології прибирання і дезінфекції «Вермоп» (Німеччина).

3.2.12. Гумові килимки, банні сандалі, шкіряне взуття, капці та ін. знезаражують способами протирання, зрощення або занурення у робочий розчин засобу. Після закінчення дезінфекції промивають водою.

3.2.13. Прибиральний інвентар занурюють у місткості з розчином засобу, які щільно закривають кришкою. Після закінчення дезінфекції промивають водою та висушують.

3.2.14. Медичні відходи з текстильних матеріалів (в тому числі перев'язувальний матеріал, ватні тампони, серветки, одноразова білізна), вироб медичного призначення одноразового використання, медичні рукавички повністю занурюють у робочий розчин засобу у місткості, які щільно закривають кришкою. Після закінчення дезінфекції утилізують.

3.2.15. Біологічні рідини та інші контаміновані виділення (кров, сироватка, сліз, мокротиння, слина, блювотні маси, фекалії, сеча, промивні води після полоскання зівя, зминні води після миття хворого тощо) заливають розчином засобу у спеціалізовані об'єми розчину та виділень 2.1. Після закінчення дезінфекції утилізують. Посуд 3-під виділень занурюють у розчин засобу. Після закінчення дезінфекції посуд промивають водою.

3.2.16. Дезінфекцію санітарного транспорту для перевезення інфекційних хворих проводять за режимом обробки при відповідній інфекції.

3.2.17. Дезінфекцію і миття сміттєпроводів, контейнерів та інших місткостей для сміття проводять способом розплення робочого розчину засобу або методом протирання згідно режимів, зазначених в таблицях 2-6.

3.2.18. Дезінфекцію повітря на різних об'єктах, систем вентиляції і кондиціонування повітря (побутові кондиціонери, спліт-системи, мультизональні спліт-системи та ін.) проводять способом розплення робочого розчину засобу або методом протирання згідно режимів, зазначених в таблицях 2-6.

3.2.19. Дезінфекцію виробів медичного призначення, інструментарію, у тому числі суміщену з їх дезінфікаційним очищенням, проводять в емальованих (без пошкодження емалі), скляних або пластмасових місткостях, які закриваються кришками за режимами, наведеними у таблиці 2-7. Вироби повністю занурюють у розчин засобу «Бланідас Актив (Blanidas® Active)» відрізу ж після їх застосування. Вироби, які мають канали, звільняють від повітря, заплюскують розчином усі канали і порожнини, використовуючи допоміжні засоби (шприци, пістетки тощо). Роз'єми виробів занурюють у розчин засобу в розібраному вигляді. Інструменти, що мають замкові частини, занурюють розкритими, попередньо зробивши ними у розчин кілька робочих рухів для кращого проникнення розчину у важкодоступні ділянки інструментів. Під час дезінфекції канали і порожнини повинні бути заповнені (без повітряних пробок) розчином.

Після дезінфекції виробів медичного призначення промивають проточною водою протягом 3 хв. та споліскують водою протягом 0,5-1,0 хв. Канали та порожнини промивають

шляхом прокачування криз них проточної води за допомогою шприців безрезервного типу дії або електровідсмоктувача. Після цього виробу висушують за допомогою чистих тканинних серветок.

Для виробів медичного призначення та їх частин, що безпосередньо не дотикаються до пацієнта, допускається дворазове, з інтервалом 15 хв., протирання ганчір'ям, що змочене робочим розчином засобу «Бланідас Актив (Blanidas® Active)», та наступною витримкою відповідно до встановленої експозиції. Після дезінфекції виробу медичного призначення промивають проточною водою протягом 3-х хвилин. Після цього виробу обполіскують дистильованою водою протягом 0,5-1,0 хвилин та висушують за допомогою чистих тканинних серветок і зберігають у медичній шафі.

Використані серветки, промивні води і місткості для промивання знезаражують шляхом кип'ятіння або дезінфікують засобом згідно з режимами, рекомендованими цими методичними вказівками.

3.2.20. Дезінфекцію і поєднання процесів дезінфекції та дезінфікаційного очищення виробів медичного призначення можна проводити механізованим способом в усіх ультразвукових установках у відповідності з рекомендаціями виробника ультразвукових приладів.

3.2.21. Для очищення, дезінфекції, у тому числі суміщеної з дезінфікаційним очищенням, дезінфекції високого рівня ендоскопів та медичних інструментів до них застосовують технологію обробки, викладену у відповідних офіційних документах.

3.2.22. Дезінфекцію (в тому числі дезінфекцію високого рівня) та суміщені процесів дезінфекції і дезінфікаційного очищення гнучких та жорстких ендоскопів проводять ручним, автоматизованим або циркуляційним способом. Після закінчення ендоскопичного дослідження зовнішні поверхні ендоскопу очищують від забруднення (шпунковий, кишковий сік, сліз, кров та ін.) за допомогою серветок. Канали прочищають шляхом подачі в них повітря та води. Жорсткі ендоскопи перед очищенням розбирають на комплектуючі деталі. Промивні води після очищення ендоскопу збирають у промарковану місткість зі щільно прилеглою кришкою, після цього дезінфікують розчином засобу. Обробку проводять у спеціальних ваннах, емальованих, пластмасових або скляних місткостях, щільно закритих кришкою, шляхом занурення деталей та вузлів жорстких ендоскопів (за винятком окулярних частин оптичних трубок) і гнучких частин гнучких ендоскопів у робочий розчин засобу «Бланідас Актив (Blanidas® Active)». Канали ендоскопів заповнюють розчином за допомогою шприца або електровідсмоктувача. Особливу увагу слід звернути на біопсійні канали і обережно очистити їх механічним шляхом.

Після завершення експозиції ендоскопи, їх частини виймають із розчину, очищують канали від залишків розчину за допомогою шприца або електровідсмоктувача та промивають, пропускаючи через канал не менше 50 мл води. Залишки промивної води із зовнішньої поверхні ендоскопа видаляють за допомогою стерильної марлевої серветки або стерильного паперового рушника, ретельно протираючи окуляр в місцях виходу контактів. Канали продувають профільтрованим повітрям.

Дезінфекцію і поєднання процесів дезінфекції та дезінфікаційного очищення ендоскопів автоматичним (циркуляційним) способом здійснюють у відповідності до інструкції, що додається до спеціального обладнання для циркуляційної дезінфекції ендоскопів.

3.2.23. Для дезінфекції виробів медичного призначення, у тому числі суміщеної з їх дезінфікаційним очищенням, і дезінфекції високого рівня ендоскопів допускається багаторазове використання робочих розчинів засобу «Бланідас Актив (Blanidas® Active)» протягом терміну їх придатності за умов відсутності зміни зовнішнього вигляду розчину (помутніння, поява пласків тощо). При перших ознаках зміни зовнішнього вигляду розчину та при негативних результатах хіміко-аналітичного контролю розчину на вміст активно діючих речовин, розчин необхідно замінити.

3.2.24. Дезінфікаційне очищення усіх видів виробів медичного призначення з різних матеріалів та медичного інструментарію, включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них з використанням розчину засобу «Бланідас Актив (Blanidas® Active)» проводять ручним згідно режимів, зазначених в таблиці 10.

Дезінфікаційне очищення виробів медичного призначення можна проводити

механізованим способом в усіх ультразвукових установках у відповідності з рекомендаціями виробника ультразвукових приладів.

Робочі розчини засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» для достерилізаційного очищення виробів медичного призначення можна використовувати багаторазово протягом терміну їх придатності за умови відсутності зміни зовнішнього вигляду розчину (помутніння, поява пластівців тощо).

3.2.25. Якість достерилізаційного очищення виробів медичного призначення оцінюють шляхом постановки проби на наявність залишкових кількостей крові та залишків лужних компонентів розчину згідно з методиками, викладеними в офіційно діючих методичних документах. Контролю підлягає і % одночасно оброблених виробів одного найменування (але не менше 3-х виробів). У випадку позитивної проби вся група виробів, від якої добирала виробу для контролю, підлягає повторній обробці до одержання негативного результату.

3.2.26. Стерилізацію виробів медичного призначення, що виготовлені з металу, скла, полімерних матеріалів та гуми тощо (в тому числі термолабільних хірургічних, гінекологічних, стоматологічних інструментів, гнучких і жорстких ендоскопів та медичних інструментів до них) робочим розчином засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» виконують після дезінфекції, достерилізаційного очищення, ополіскування і висушування. Достерилізаційне очищення виробів проводять засобом «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» згідно п. 3.2.23 або іншими зареєстрованими в Україні і дозволеними до використання з цією метою засобами.

Стерилізацію виробів медичного призначення засобом «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» проводять у стерильних пластмасових, скляних або емальованих (без пошкодження емалі) ємностях, що закриваються кришками, при повному зануренні виробів у розчин, забезпечуючи ретельне заповнення ним всіх каналів і порожнин виробів. Для кращого заповнення каналів виробів засобом і повного видалення з них пухирців повітря використовують шприци, піпетки або інші допоміжні засоби. Роз'ємні виробу занурюють у розчин у розібраному вигляді. Вироби повинні бути вільно розміщені у ємності і повністю покриті розчином.

Режими стерилізації наведені у таблиці 9. При проведенні стерилізації всі маніпуляції виконують із дотриманням асептичних умов, використовуючи стерильні ємності для води, воду, інструменти, стерильні рукавички. Після закінчення стерилізації виробу виймають з розчину, видалюють з каналів розчин і переносять у стерильну ємність зі стерильною водою для відмивання від залишків засобу. Відмивання здійснюють шляхом дворазового (по 10 хв. кожне) занурення виробів у воду при співвідношенні об'єму води до об'єму виробів, не менше 3:1. Через канали виробів за допомогою шприца або електровідсмоктувача при кожному відмиванні пропусають (не менше 20 мл) стерильну воду протягом 3-5 хв., не допускаючи потрапляння в ємність із виробами, що відмиваються.

Ємність та воду, використані для відмивання стерильних виробів від залишків засобу, попередньо стерилізують паровим методом при температурі (132±2) °С протягом 20 хв.

Відмиті стерильні виробу розміщують на стерильному простиралді, видаляють залишок води з каналів за допомогою стерильного шприца і перекладають у стерильну ємність, яка викладена стерильним простиралдом або у стерильний мішок із тканини. Термін зберігання стерильних виробів не більше 3 дб.

3.2.27. Відтиски, зубопротезні заготовки, зліпки, мости, коронки, артикулятори перед дезінфекцією промивають проточною водою (без застосування механічних засобів), видаляють залишки води і знезаражують методом занурення у робочий розчин засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» у ємність, яку щільно закривають кришкою. Після дезінфекції виробу ретельно промивають питною водою протягом 3-5 хв. і дають висохнути.

Вироби великих розмірів (корсети, шини, апарати, тутори, пристрої для розробки рухів тощо) дезінфікують способом двократного, з інтервалом 15 хв., протирання серветкою, змоченою розчином засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» з наступною витримкою відповідно до встановленої експозиції. Після дезінфекції ретельно промивають питною водою протягом 3-5 хв. Всі дії необхідно виконувати у відповідності з технологією, прийнятою в стоматологічній практиці. Режими наведені в таблицях 2-7.

3.2.28. Для дезінфекції слиновідсмоктуючих установок робочий розчин засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» (не менше 1,0 л) пропусають через відсмоктувальні шланги

і залишають в установці на час експозиції. Після закінчення дезінфекції через установку пропускають питну воду протягом 3-5 хв. Плівчанині заливають робочим розчином засобу. Після дезінфекції ретельно промивають питною водою протягом 3-5 хв. Режими наведені в таблицях 2-7.

3.2.29. Дезінфекцію наркозно-дыхальної апаратури у тому числі суміщену з її достерилізаційним очищенням, проводять наступним чином. Шланги, замкові та з'єднувальні елементи, маски, інші деталі занурюються в розчин засобу у відповідності до режимів обробки, заповнюють усі канали і порожнини, використовуючи допоміжні засоби, які при цьому звільняються від повітря. Після дотримання необхідної експозиції виробу миють в тому ж розчині, в якому здійснювалось замочування за допомогою ватно-марлевого тампону. Використання йоршів забороняється.

Після дезінфекції виробу промивають в два етапи. Спочатку виробу промивають водою згідно рекомендацій, що наведені в таблиці 8. На другому етапі всі виробу промивають в дистильованій воді. Шланги загортають в простиралдо, підвисувають і висушують в такому стані. Комплектуючі деталі викладають на стерильні простиралда і сушать в закритому вигляді. Зберігають шланги й комплектуючі деталі в асептичних умовах. Поверхні обладнання обробляються згідно п. 3.2.2.

3.2.30. Дезінфекцію, у тому числі суміщену з їх достерилізаційним очищенням, а також стерилізацію перукарського, манікюрного, педикюрного, косметичного інструментарію і приладдя на підприємствах сфери обслуговування проводять згідно вимог, описаних в п. 3.2.18, 3.2.22-3.2.25 за режимами, наведеними в таблицях 2-7, 9.

3.2.31. Розчин засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» використовують для боротьби з пліснявою і для попередження її появи. Для цього поверхню протирають ганчір'ям, змоченим розчином, або зрошують розчином. Дають розчину висохнути. Поверхню, яка вражена пліснявою, попередньо очищують від видимих проявів плісняви. Обробку повторюють щотижня або при появі ознак плісняви.

3.2.32. Режими дезінфекції об'єктів при проведенні генеральних прибирань у лікувально-профілактичних закладах розчинами засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» наведені у таблиці 11.

3.2.33. Режими дезінфекції об'єктів на транспорті, на підприємствах парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчопереробної промисловості, в спортивно-оздоровчих установах, об'єктів комунально-побутового обслуговування тощо зазначені у таблицях 2-6.

Таблиця 2. Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» при кишкових і крапельних інфекціях бактеріальної етіології (в т. числі *Listeria monocytogenes*, *P.aeruginosa* (Antibiotic resistant), *E.hirae*, *S.aureus*, мультирезистентний стафілокок (MRSA), ентерогеморагічна кишкова паличка (*Escherichia coli*), сальмонели, *Neisseria meningitidis* (за виключенням туберкульозу), при збудниках внутрішньокішкарних інфекцій*.

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції

Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо), на транспорті (в т. числі санітарний транспорт) та його рухомому складі, предмети обстановки (меблі тощо): - забруднені; - забруднені	0,05	60	Протирання або зрошення
	0,1	30	
Медичні апарати, прилади і устаткування, кувези: - забруднені; - забруднені	0,05	60	Протирання
	0,1	30	

Продовження табл. 2

Об'єкт деззараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Предмети догляду хворих (ушові грілки, міхури для льоду, термометри, клебонки тощо), засоби гігієни	0,05	60	Занурення, протирання або зрошення
	0,1	30	
Столовий, кухонний, аптечний посуд (у тому числі одноразового використання): - без залишків їжі; - із залишками їжі	0,05	60	Занурення
	0,1	30	
Залишки їжі	0,05	60	Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та залишків 2:1
	0,1	30	
Лабораторний посуд: - забруднений; - забруднений	0,05	60	Занурення
	0,1	30	
Предмети для миття посуду, прибиральний інвентар	0,05	60	Занурення або замочування
	0,1	30	
Іграшки	0,05	60	Занурення або протирання
	0,1	30	
Ушові килимки, банні сандалі, шкряпане взуття, капці, дерев'яні граблі в лазнях, саунах, душових	0,05	60	Занурення, протирання або зрошення
	0,1	30	
Білизна: - не забруднена; - забруднена виділеннями	0,05	60	Замочування
	0,1	30	

Візки для складання і транспортування білизни, тара, стелажі для зберігання білизни	0,05 0,1	60 30	Протирання або зрошення
Санітарно-технічне обладнання (ванни, раковини, унітази)	0,05 0,1	60 30	Зрошення або протирання
Медицинські відходи з текстильних матеріалів (в тому числі перешивувальний матеріал, вагати тампони, серветки, одноразову білизну, слезодяг, вироби медичного призначення одноразового використання, медичні рукавички тощо)	0,05 0,1	60 30	Замочування або занурення
Біологічні рідини та інші контаміновані виділення (кров, сироватка, слиз, мокротиння, слина, біловотні маси, фекалії, сеча, промивні води після полоскання зів, змивні води після миття хворого тощо)	0,05 0,1	60 30	Заливання розчином у співвідношенні об'єму розчину та виділень 2:1
Посуд з-під виділень	0,05 0,1	60 30	Занурення
Сміттєпроводи, контейнери та інші місткості для сміття	0,05 0,1	60 30	Зрошення
Вентиляційні камери, системи кондиціонування повітря	0,05 0,1	60 30	Зрошення або протирання
Стоматологічні матеріали, стоматологічні сніновідсмоктуючі установки, плавальні	0,05 0,1	60 30	Занурення або протирання
Технологічне обладнання і технологічні місткості для парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчопереробної промисловості, в тому числі холодильники, рефрижератори, холодильники і охолоджуючі камери (внутрішні поверхні)	0,05 0,1	60 30	Протирання або зрошення
Солярії, барокамери, СПА-капули	0,05 0,1	60 30	Протирання

Спортивне обладнання та інвентар	0,05 0,1	60 30	Протирання
Чаща басейну	0,05 0,1	60 30	Протирання або зрошення
Вироби медичного призначення усіх видів з різних матеріалів, в тому числі гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти (у тому числі ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки), зонди усіх видів, катетери тощо)	0,05 0,1	60 30	Занурення
Інструменти для манікюру, педикюру, інші косметологічні інструменти, ножиці, інструменти та предмети із пластичних мас (штuki, гребінці), інструменти для нанесення татуажу, перманентного макіяжу, піролінгу	0,05 0,1	60 30	Занурення

Примітка: * - при забрудненні об'єктів кров'ю та іншими біологічними субстратами дезінфекцію проводять за режимами, рекомендованими при вірусних парентеральних інфекціях.

Таблиця 3. Режими дезінфекції об'єктів розчином засобу «Бланідак Актив (Blanidas® Active)» при кривельних і кишкових інфекціях вірусної етіології (включаючи гепатит А, парентеральні віруси гепатити (В, С), вірус СНІД (ВІЛ), герпес, грици, паратрип, вірус «пташиного грипу», вірус «свинячого грипу» А(Н1N1), рога, поліо-(попомієліт), корона-, папова-, ентєровіруси, хантавіруси, вакциновіруси, аденовіруси, вірус Avian influenza).

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо), на транспорті (в т. числі санітарний транспорт) та його рухомому складі, предмети обстановки (мебл тощо)	0,05	60	Протирання або зрошення
	0,1	30	
	0,25	15	
	0,5	5	
Медицинські апарати, прилади і устаткування, кувети	0,05	60	Протирання
	0,1	30	
	0,25	15	
Предмети догляду хворих (гумові грilьки, міхури для льоду, термометри, клейонки тощо), засоби гігієни	0,05	60	Занурення, протирання або зрошення
	0,1	30	
	0,25	15	
	0,5	5	

Продовження табл. 3

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Столовий, кухонний, аптечний посуд (у тому числі одноразового використання)	0,05	60	Занурення
	0,1	30	
	0,25	15	
	0,5	5	
Залишки їжі	0,05	60	Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та залишків 2:1
	0,05	60	
	0,1	30	
	0,25	15	
Лабораторний посуд	0,05	60	Занурення
	0,1	30	
	0,25	15	
	0,5	5	
Предмети для миття посуду, прибиральний інвентар	0,05	60	Занурення або замочування
	0,1	30	
	0,25	15	
	0,5	5	
Іграшки	0,05	60	Занурення або протирання
	0,1	30	
	0,25	15	
	0,5	5	
Гумові килимки, банні сандалі, шкіряне взуття, капці, дерев'яні трапи в лазнях, саунах, душевих	0,05	60	Занурення, протирання або зрошення
	0,1	30	
	0,25	15	
	0,5	5	
Білизна	0,05	60	Замочування
	0,1	30	
	0,25	15	
	0,5	5	
Візки для складання і транспортування білизни, тара, стелажі для зберігання білизни	0,05	60	Протирання або зрошення
	0,1	15	
	0,25	15	
	0,5	5	
Санітарно-технічне обладнання (ванни, раковини, унітази)	0,05	60	Зрошення або протирання
	0,1	30	
	0,25	15	
	0,5	5	

Медицинські відходи з текстильних матеріалів (в тому числі перешивні матеріали, ватяні тампони, серветки, одноразову білизну, спецодегу, виробничого призначення одноразового використання, медичні рукавички тощо)	0,05	60	Замочування або занурення
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	---------------------------

Продовження табл. 3

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Біологічні рідини та інші контаміновані відходи (кров, сироватка, слизи, мокротиння, слюна, білкові маси, фекалії, сеча, промивні води після полоскання зів'язи, змивні води після миття хворого тощо)	0,05	60	Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та відлинь 2:1
	0,05	60	
	0,1	30	
	0,25	15	
Посуд з-під відлинь	0,05	60	Занурення
	0,05	60	
	0,1	30	
	0,25	15	
Сміттєпроводи, контейнери та інші місткості для сміття	0,05	60	Зрошення або протирання
	0,1	30	
	0,25	15	
	0,5	5	
Повітря приміщень, вентиляційні камери, системи кондиціонування повітря	0,05	60	Зрошення або протирання
	0,1	30	
	0,25	15	
	0,5	5	
Стоматологічні матеріали, стоматологічні слиновідсмоктуючі установки, плевральні	0,1	30	Занурення або протирання
	0,25	15	
	0,5	5	
	0,05	60	
Технологічне обладнання і технологічні місткості для парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчопереробної промисловості, в тому числі холодильники, рефрижератори, холодильні і охолоджуючі камери (внутрішні поверхні)	0,05	60	Протирання або зрошення
	0,1	30	
	0,25	15	
	0,5	5	
Солярії, барокамери, СПА-капсули	0,05	60	Протирання
	0,1	30	
	0,25	15	
	0,5	5	
Спортивне обладнання та інвентар	0,05	60	Протирання
	0,1	30	
	0,25	15	
	0,5	5	
Чаща басейну	0,05	60	Протирання або зрошення
	0,1	30	
	0,25	15	
	0,5	5	

Вироби медичного призначення усіх видів з різних матеріалів, в тому числі гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти (у тому числі ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки), зонди усіх видів, катетери тощо)	0,1 0,25 0,5	30 15 5	Занурення
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------	-----------

Закінчення табл. 3

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Інструменти для манікюру, педикюру, інші косметологічні інструменти, ножиці, інструменти та предмети із пластичних мас (щіпки, гребінці), інструменти для нанесення татуажу, перманентного макіяжу, пірсингу	0,1 0,25 0,5	30 15 5	Занурення

Таблиця 4. Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу «Бланідакс Актив (Blanidas® Active)» при туберкульозі.

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо), на транспорті (в т. числі санітарний транспорт) та його рухомому складі, предмети обстановки (меблі тощо)	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	Протирання або зрошення
Медичні апарати, прилади і устаткування, кузези	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	Протирання
Предмети догляду хворих (гумові грілки, міхури для льоду, термометри, клейонки тощо), засоби гігієни	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	Занурення, протирання або зрошення
Столовий, кухонний, аптечний посуд (у тому числі одноразового використання)	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	Занурення
Залишки їжі	0,02 0,05 0,1	240 120 60	Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та залишків 2:1

Лабораторний посуд	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	Занурення
Предмети для миття посуду, прибиральний інвентар	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	Занурення або замочування

Продовження табл. 4

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Іграшки	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	Занурення або протирання
Гумові килимки, банні сандали, шкіряне взуття, капці, дерев'яні трапи в лазнях, саунах, душових	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	Занурення, протирання або зрошення
Білізна	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	Замочування
Візки для складання і транспортування білизни, тара, стелажі для зберігання білизни	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	Протирання або зрошення
Санітарно-технічне обладнання (ванни, раковини, унітази)	0,02 0,05 0,1 0,2 0,3	240 120 60 30 15	Зрошення або протирання
Медичні відходи з текстильних матеріалів (в тому числі перев'язувальний матеріал, ватяні тампони, серветки, одноразову білизну, спецодяг, вироби медичного призначення одноразового використання, медичні рукавички тощо)	0,02 0,05 0,1	240 120 60	Замочування або занурення
Носові хустинки, футляри і кишені для пловальниць	0,02 0,05 0,1	240 120 60	Замочування

Біологічні рідини та інші контаміновані відлілення (кров, сироватка, сліз, мокротиння, слина, блювотні маси, фекалії, сеча, промивні води після полоскання зів, змивні води після миття хворого тощо)	0,02	240	Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та відлілень 2:1
	0,05 0,1	120 60	
Плювальниці, звільнені від мокротиння	0,02	240	Занурення в розчин або заливання розчином
	0,05	120	
	0,1	60	
	0,2 0,3	30 15	

Продовження табл. 4

Об'єкт деззараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Посуд з-під відлілень	0,02	240	Занурення
	0,05	120	
	0,1	60	
	0,2	30	
	0,3	15	
Сміттєпроводи, контейнери та інші місткості для сміття	0,02	240	Зрошення
	0,05	120	
	0,1	60	
	0,2	30	
	0,3	15	
Повітря приміщень, вентиляційні камери, системи кондиціонування повітря	0,02	240	Зрошення або протирання
	0,05	120	
	0,1	60	
	0,2	30	
	0,3	15	
Стоматологічні матеріали, стоматологічні слиновідсмоктуючі установки, плювальниці	0,02	240	Занурення або протирання
	0,05	120	
	0,1	60	
	0,2	30	
	0,3	15	
Технологічне обладнання і технологічні місткості для парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчопереробної промисловості, в тому числі холодильники, рефрижератори, холодильні і охолоджуючі камери (внутрішні поверхні)	0,02	240	Протирання або зрошення
	0,05	120	
	0,1	60	
	0,2	30	
	0,3	15	
Солярії, барокамери, СПА-капсули	0,02	240	Протирання
	0,05	120	
	0,1	60	
	0,2	30	
	0,3	15	
Спортивне обладнання та інвентар	0,02	240	Протирання
	0,05	120	
	0,1	60	
	0,2	30	
	0,3	15	
Чаша басейну	0,02	240	Протирання або зрошення
	0,05	120	
	0,1	60	
	0,2	30	
	0,3	15	

Закінчення табл. 4

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Вироби медичного призначення усіх видів з різних матеріалів, в тому числі гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти (у тому числі ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки), зонди усіх видів, катетери тощо)	0,02	240	Занурення
	0,05	120	
	0,1	60	
	0,2	30	
	0,3	15	
Інструменти для манікюру, педикюру, інші косметологічні інструменти, ножиці, інструменти та предмети із пластичних мас (пілки, гребінці), інструменти для нанесення татуажу, перманентного макіяжу, пірсингу	0,02	240	Занурення
	0,05	120	
	0,1	60	
	0,3	15	

Таблиця 5. Режими дезінфекції об'єктів розчинними засобу «Бланідас Актив (Blanidas® Active)» при кандидозах.

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо), на транспорті (в т. числі санітарний транспорт) та його рухомому складі, предмети обстановки (меблі тощо): - незабруднені; - забруднені	0,05	60	Протирання або зрошення
	0,1	30	
	0,025	30	
Медичні апарати, прилади і устаткування, кувети: - незабруднені; - забруднені	0,025	60	Протирання
	0,05	30	
	0,1	15	
Предмети догляду хворих (гумові грілки, міхури для льоду, термометри, клейонки тощо), засоби гігієни	0,05	60	Занурення, протирання або зрошення
	0,1	30	

Продовження табл. 5

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Столовий, кухонний, аптечний посуд (у тому числі одноразового використання): - без залишків їжі; - із залишками їжі	0,05	60	Занурення
	0,1	30	
Залишки їжі	0,05	60	Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та залишків 2:1
	0,1	30	
Лабораторний посуд: - незабруднений; - забруднений	0,05	60	Занурення
	0,1	30	
Предмети для миття посуду, прибиральний інвентар	0,025	60	Занурення або замочування
	0,05	30	
	0,1	15	
Іграшки	0,05	60	Занурення або протирання
	0,1	30	
Гумові килимки, банні сандали, шкіряне взуття, капці, дерев'яні трапи в лазнях, саунах, душових	0,05	60	Занурення, протирання або зрошення
	0,1	30	
Білизна: - не забруднена; - забруднена виділеннями	0,05	60	Замочування
	0,1	30	
Візки для складання і транспортування білизни, тара, стелажі для зберігання білизни	0,05	60	Протирання або зрошення
	0,1	30	
Санітарно-технічне обладнання (ванни, раковини, унітази)	0,05	60	Зрошення або протирання
	0,1	30	

Продовження табл. 5

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Медичні відходи з текстильних матеріалів (в тому числі перев'язувальний матеріал, вагіні тампони, серветки, одноразову білизну, спецодегу, виробі медичного призначення одноразового використання, медичні рукавички тощо)	0,05 0,1	60 30	Замочування або занурення
Біологічні рідинні та інші контаміновані виділення (кров, сироватка, слю, мокротиння, слина, блівотні маси, фекалії, сеча, промивні води після полоскання зів, змивні води після миття хворого тощо)	0,05 0,1	60 30	Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та виділень 2:1
Посуд з-під виділень	0,05 0,1	60 30	Занурення
Сміттєпроводи, контейнери та інші місткості для сміття	0,05 0,1	60 30	Зрошення
Повітря приміщень, вентиляційні камери, системи кондиціонування повітря	0,05 0,1	60 30	Зрошення або протирання
Стоматологічні матеріали, стоматологічні слиновідсмоктуючі установки, пловальниці	0,05 0,1	60 30	Занурення або протирання
Технологічне обладнання і технологічні місткості для парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчопереробної промисловості, в тому числі холодильники, рефрижератори, холодильні і охолоджуючі камери (внутрішні поверхні)	0,05 0,1	60 30	Протирання або зрошення
Соларії, барокамери, СПА-капули	0,05 0,1	60 30	Протирання
Спортивне обладнання та інвентар	0,05 0,1	60 30	Протирання

Закінчення табл. 5

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Чаша басейну	0,05 0,1	60 30	Протирання або зрошення
Вироби медичного призначення усіх видів з різних матеріалів, в тому числі гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти (у тому числі ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки), зонди усіх видів, катетери тощо)	0,05 0,1	60 30	Занурення
Інструменти для манікюру, педикюру, інші косметологічні інструменти, ножиці, інструменти та предмети із пластичних мас (пітки, гребінці), інструменти для нанесення татуажу, перманентного макіяжу, пірсингу	0,05 0,1	60 30	Занурення

Таблиця 6. Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу «Бланідас Актив (Blanidas® Active)» при дерматомікозах, пліснявих грибах та небезпечних і особливо небезпечних інфекціях (в т.ч. чума, туляремія, черевний тиф, холера, легіонельоз, клостридії).

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо), на транспорті (в т.ч. числі санітарний транспорт) та його рухомому складі, предмети обстановки (меблі тощо)	0,1 0,2	90 60	Протирання або зрошення
Медичні апарати, прилади і устаткування, кувези	0,1 0,2	90 60	Протирання
Предмети догляду хворих (гумові грілки, міхури для льоду, термометри, клейонки тощо), засоби гігієни	0,1 0,2	90 60	Занурення, протирання або зрошення
Столовий, кухонний, аптечний посуд (у тому числі одноразового використання)	0,1 0,2	90 60	Занурення
Залишки їжі	0,1 0,2	90 60	Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та залишків 2:1

Продовження табл. 6

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Лабораторний посуд	0,1 0,2	90 60	Занурення
Предмети для миття посуду, прибиральний інвентар	0,1 0,2	90 60	Занурення або замочування
Іграшки	0,1 0,2	90 60	Занурення або протирання
Гумові килимки, банні сандали, шкіряне взуття, калці, дерев'яні граби в лазнях, саунах, душових	0,1 0,2	90 60	Занурення, протирання або зрошення
Білизна	0,1 0,2	90 60	Замочування
Візки для складання і транспортування білизни, тара, стелажі для зберігання білизни	0,1 0,2	90 60	Протирання або зрошення
Санітарно-технічне обладнання (ванни, раковини, унітази)	0,1 0,2	90 60	Зрошення або протирання
Медичні відходи з текстильних матеріалів (в тому числі перев'язувальний матеріал, ватяні тампони, серветки, одноразову білизну, спецодег, вироби медичного призначення одноразового використання, медичні рукавички тощо)	0,1 0,2	90 60	Замочування або занурення
Біологічні рідини та інші контаміновані виділення (кров, сироватка, слиз, мокротиння, слізна, білковотні маси, фекалії, сеча, промивні води після полоскання зів, змивні води після миття хворого тощо)	0,1 0,2	90 60	Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та виділень 2:1
Посуд з-під виділень	0,1 0,2	90 60	Занурення
Сміттєпроводи, контейнери та інші місткості для сміття	0,1 0,2	90 60	Зрошення
Повітря приміщень, вентиляційні камери, системи кондиціювання повітря	0,1 0,2	90 60	Зрошення або протирання
Стоматологічні матеріали, стоматологічні слиновідсмоктуючі установки, плювальниці	0,1 0,2	90 60	Занурення або протирання

Продовження табл. 6

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Технологічне обладнання і технологічні місткості для парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчопереробної промисловості, в тому числі холодильники, рефрижератори, холодильні і охолоджуючі камери (внутрішні поверхні)	0,1 0,2	90 60	Протирання або зрошення
Солярії, барокамери, СПА-капули	0,1 0,2	90 60	Протирання
Спортивне обладнання та інвентар	0,1 0,2	90 60	Протирання
Чаща басейну	0,1 0,2	90 60	Протирання або зрошення
Вироби медичного призначення усіх видів з різних матеріалів, в тому числі гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти (у тому числі ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки), зонди усіх видів, катетери тощо)	0,1 0,2	90 60	Занурення
Інструменти для манікюру, педикюру, інші косметологічні інструменти, ножиці, інструменти та предмети із пластичних мас (шпатель, гребінець), інструменти для нанесення татуажу, перманентного макіяжу, пірсингу	0,1 0,2	90 60	Занурення

Таблиця 7. Режими дезінфекції, суміщеної із достерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення (включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні інструменти тощо) розчинами засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)».

Етапи обробки	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Температура розчину, °С	Експозиція, хв.
Замочування виробів, при повному зануренні в робочий розчин і заповненні ним порожнин і каналів: - при бактеріальних (за винятком туберкульозу), збудниках внутрішньолікарняних інфекцій, вірусних інфекцій та кандидозах; - при туберкульозі;	0,1	Не регламентується	30
	0,25		15
- при дерматомікозах, пліснявих грибах, особливо небезпечних інфекціях.	0,2	Не регламентується	5
	0,3		240
Миття кожного виробу у тому ж розчині, де здійснювалось замочування, за допомогою йоржа або щітки, виробів із гуми та пластмас (в тому числі ендоскопи) - за допомогою ватно-марлевого тампону або тканинної серветки, каналів - за допомогою шприца: - виробу простої конфігурації без замкових частин, каналів, порожнин; - виробів, які мають замкові частини, канали і порожнини; - гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них	0,02	Не регламентується	120
	0,05		60
Обполіскування проточною водою (замкові частини, канали і порожнини виробів - за допомогою шприца або електровідсмоктувача)	0,1	Не регламентується	30
	0,2		15
Обполіскування дистильованою водою (каналів - за допомогою шприца або електровідсмоктувача)	0,1	Не регламентується	90
	0,2		60
Висушування (каналів висушують за допомогою повітря)	-	-	До повного видалення вологи

Таблиця 8. Режими дезінфекції нарочно-дыхальної апаратури (в тому числі маски, шлагги, трубочки тощо) розчинами засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» при бактеріальних інфекціях (включаючи туберкульоз), збудниках внутрішньолікарняних інфекцій, вірусних інфекцій та кандидозах; при дерматомікозах, пліснявих грибах, особливо небезпечних інфекціях.

Етапи обробки	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.
Замочування при повному зануренні виробів у робочий розчин засобу і заповненні ним порожнин і каналів	0,2 0,3	30 15
Миття кожного виробу у тому ж розчині, де здійснювалось замочування: - зовнішньої поверхні за допомогою ватно-марлевого тампону або тканинної (марлевої) серветки; - внутрішніх відкритих каналів за допомогою шприца	у розчині відповідної концентрації	5,0
Обполіскування проточною водою	-	5,0
Обполіскування дистильованою водою	-	0,5
Висушування	-	До повного видалення вологи

Таблиця 9. Режими стерилізації виробів медичного призначення (включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, гінекологічні, стоматологічні інструменти тощо), косметологічних інструментів, режими дезінфекції високого рівня ендоскопів розчинами засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)».

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб застосування
Стерилізація Термолабільні виробу медичного призначення, в тому числі гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, стоматологічні гінекологічні інструменти, зонди, катетери тощо; термолабільні інструменти для манікюру, педикюру, інші косметологічні інструменти, ножиці, інструменти та предмети із пластичних мас (щітки, гребінці), інструменти для нанесення татуажу, перманентного макіяжу, пірсингу	2,5 4,0 5,0	180 60 15	Занурення

Дезинфекція високого рівня Гнучкі і жорсткі ендоскопи	1,0	5	Занурення
----------------------------------------------------------	-----	---	-----------

Таблиця 10. Режими дестерилізаційного очищення виробів медичного призначення (включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них, хірургічні, гінекологічні, стоматологічні інструменти тощо) розчинами засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» ручним способом.

Етапи обробки	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Температура розчину, °С	Експозиція, хв.
Замочування виробів, при повному зануренні в робочий розчин і заповненні ним порожнин і каналів	0,1	Не регламентується	15
Миття кожного виробу у тому ж розчині, де здійснювалось замочування, за допомогою йоржа або щітки, виробів із гуми та пластмас (в тому числі ендоскопи) - за допомогою ватно-марлевого тампону або тканинної серветки, каналів - за допомогою шприца: - вироби простої конфігурації без замкових частин, каналів, порожнин; - вироби, які мають замкові частини, канали і порожнини; - гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них	у розчинах, які використовуються для замочування	Не регламентується	0,5 1 2-3
Обполіскування проточною водою (замкові частини, канали і порожнини виробів - за допомогою шприца або електровідсмоктувача)	Не нормується		3-5
Обполіскування дистильованою водою (каналів - за допомогою шприца або електровідсмоктувача)	Не нормується		0,5-1
Висушування (канали висушують за допомогою повітря)			До повного видалення вологи

Таблиця 11. Режими дезинфекції об'єктів при проведенні генеральних прибирань у лікувально-профілактичних закладах розчинами засобу «Бланідас Актив (Blandidas® Active)».

Об'єкт знезараження	Концентрація розчину, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезинфекції
Дитячі стаціонари, акушерсько-гінекологічні клініки, пологові будинки, відділення неонатології, палати, блоки і відділення інтенсивної терапії для новонароджених, педіатричні відділення	0,05 0,1	60 30	Протирання
Соматичні, хірургічні відділення, процедурні кабінети, стоматологічні клініки і кабінети, клінічні лабораторії	0,05 0,1	60 30	Протирання або зрошення
Протитуберкульозні лікувально-профілактичні заклади	0,1	60	Протирання або зрошення
Інфекційні лікувально-профілактичні заклади	Режим при відповідній інфекції		Протирання або зрошення
Шкірно-венерологічні лікувально-профілактичні заклади	0,2	60	Протирання або зрошення

4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ

4.1. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при роботі із засобом. Всі роботи із концентратом слід проводити у захисному одязі, захищаючи шкіру рук рукавичками, уникаючи попадання його в очі та на шкіру.

4.2. Загальні застереження при роботі із засобом. Забороняється вживати їжу, палити під час виконання робіт з дезинфекції. При проведенні робіт з дезинфекції слід уникати розбризкування та попадання засобу в очі і на шкіру. Після закінчення роботи обличчя і руки необхідно вимити водою з милом. До роботи із засобом не допускаються вагітні жінки та жінки, що годують немовлят, а також особи, що мають алергічні захворювання та ушкодження шкіри.

4.3. Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів та в умовах застоювання засобу для обробки окремих об'єктів. Допускається приготування робочих розчинів та проведення дезинфекції об'єктів розчинами «Бланідас Актив (Blandidas® Active)» концентраті 0,5% і менше способом протирання, замочування, занурення (в закритих кришкою ємностях) у присутності хворих та осіб, безпосередньо не причетних до проведення дезинфекційних заходів (пацієнтів, у тому числі дітей, школярів, відвідувачів закладів відпочинку, розваг, перукарень, пасажирів на транспорті тощо) без захисту органів дихання і очей.

Роботи з використанням робочих розчинів засобів методом зрошення потрібно виконувати з дотриманням заходів особистої безпеки, які забезпечують захист органів дихання, шкіри та очей - у захисному одязі (халат, шапочка, гумові рукавички), у захисних окулярах типу ПО - 2, ПО-3 чи моноблочки, у респираторі типу РУ - 60 М, РПГ - 67 з патроном марки «В» або «Пелюстка». Обробку проводити за відсутності людей.

4.4. Методи утилізації засобу. Парті засобу з вичерпаним терміном придатності та некондиційний, внаслідок порушення умов зберігання, дезинфекційний засіб підлягає поверненню на підприємство-виробник для переробки.

Допускається зливання відпрацьованих та невикористаних робочих розчинів засобу в каналізацію без додаткового розведення і без додавання нейтралізаторів. Не допускається потрапляння нерозбавленого продукту в стічні поверхневі чи підземні води і в каналізацію!

5. ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОТРУЄННІ

5.1. Ознаки гострого отруєння. За умови недотримання застережних заходів і порушення правил проведення робіт із засобом методом зрошення можливі місцеві подразнювальні реакції шкіри, очей та верхніх дихальних шляхів з наступним розвитком гіперемії, набряку і слюзотечі, деря у горлі, нежиті, кашлю.

5.2. Заходи першої допомоги при гострому (респіраторному) отруєнні. Потерпілого слід негайно вивести на свіже повітря або в добре провітрюване приміщення, рот і носолотку промити питною водою, дати тепле пиття (чай, молоко). Звернутись до лікаря.

5.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі. При випадковому попаданні засобу в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-15 хв., закапати 1-2 краплі розчину сульфацилу натрію та звернутись до лікаря.

5.4. Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру. При випадковому попаданні засобу на шкіру потрібно промити забруднену ділянку проточною водою. При попаданні засобу на оляг його необхідно зняти і випрати перед повторним застосуванням. Промити ділянку шкіри під олягом проточною водою.

5.5. Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку. При випадковому попаданні засобу в шлунок необхідно дати випити потерпілому кілька склянок води з 10-20 подрібненими таблетками активованого вугілля. Не викликати блювання! Звернутись до лікаря.

6. ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ

6.1. Пакування засобу. «Бланідас Актив (Blanidas® Active)» упаковують у скляні та полімерні флакони, пляшки місткістю від 50 мл до 2000 мл, поліетиленові дозовані пакети (солетки) від 5 мл до 100 мг. Допустима похибка при фасуванні не повинна перевищувати ±0,5 % від об'єму фасування.

Засіб «Бланідас Актив (Blanidas® Active)» також може бути упакований у тару полімерну перевищувати ± 1,0 % від об'єму фасування.

6.2. Умови транспортування засобу. Засіб «Бланідас Актив (Blanidas® Active)» транспортують у пакуванні виробника автомобільним чи залізничним транспортом відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів автомобільним та залізничним транспортом.

6.3. Терmini та умови зберігання. Засіб «Бланідас Актив (Blanidas® Active)» зберігають у герметично закритій тарі виробника в добре вентильованих критих неопалюваних складських приміщеннях, які захищені від вологи та прямого сонячного проміння, при температурі від 0 °С до 40 °С. Засіб зберігають осторонь від джерел відкритого вогню і тепла. Гарантійний термін зберігання - 36 місяців з дати виробництва.

7. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ЧЕТВЕРТИННИХ АМОНІЙНИХ СПОЛУК ЗАСОБУ «БЛАНІДАС АКТИВ (BLANIDAS® ACTIVE)»

7.1. Установлення і реактиви:

- Терези лабораторні загального призначення 2-го класу точності з найбільшою межею зважування 200 г згідно ГОСТ 24104
- Набір наважок Г-2-210 згідно ГОСТ 7328
- Набір еталонних наважок ГО-11-1110 № 37 другого порядку класу F 1
- Бюретка 1-3-2-25-0,1 згідно ГОСТ 29251
- Шпелки 1-2-10(20) згідно ГОСТ 29169
- Колби 1-100(500)(1000)-2 згідно ГОСТ 1770
- Колби П-2-1000-42 ТХС згідно ГОСТ 25336
- Цилиндри 1-25(100)-2 згідно ГОСТ 1770
- Колби Кп-1-250-29(32) ТС згідно ГОСТ 25336
- Стакани В-150(250)(500) ТХС згідно ГОСТ 25336
- Лійки В-36-80 ХС згідно ГОСТ 25336

- Кислота сірчана згідно ГОСТ 4204, ч.д.а., розчин молярної концентрації $C_{(H_2SO_4)}=2,5$ моль/дм³
- Фенолфталеїн згідно ГОСТ 5850, ч.д.а., спиртвий розчин з масовою часткою 1 %
- Лаурилсульфат натрію (натрій додецилсульфат) $CH_3(CH_2)_{11}OSO_3Na$, індекс 1.12333.0050, розчин молярної концентрації $C_{(C_{12}H_{25}NO_4S)}=0,004$ моль/дм³
- Гіамін 1622 (бензотоніум хлорид), індекс 1.12058.0250, спеціально очищений, розчин молярної концентрації $C_{(C_{12}H_{25}NO_2)}=0,004$ моль/дм³
- Змішаний індикатор, розчин суміші барвників:
- Дисульфінат натрію, індекс кольору 12144.0055
- Диметилум бромід, індекс кольору 12130.0001
- Хлороформ згідно ГОСТ 20015
- Спирт етиловий ректифікований згідно ГОСТ 18300, розчин з об'ємною часткою 10 %
- Вода дистильована згідно ГОСТ 6709
- Електролітика закритого типу згідно ГОСТ 14919

7.2. Підготовки до випробування.

7.2.1. Приготування розчину сірчаної кислоти молярної концентрації $C_{(H_2SO_4)}=2,5$ моль/дм³.

За допомогою циліндру вимірюють 72,5 см³ концентрованої сірчаної кислоти та обережно, при перемішуванні, впливають у дистильовану воду в мірній колбі. Доводять об'єм розчину водою до 1 дм³.

7.2.2. Приготування спиртового розчину фенолфталеїну з масовою часткою 1 %.

Зважують 1,0 г фенолфталеїну. Результат зважування записують з точністю до четвертого десяткового знаку. Наважку переносять в колбу, розчиняють у 80 см³ етилового спирту та доводять об'єм розчину дистильованою водою до 100 см³.

7.2.3. Приготування розчину змішаного індикатора.

7.2.3.1. Приготування основного розчину.

Зважують 0,200 г диметилума броміду та 0,100 г дисульфінату натрію. Результат зважування записують з точністю до четвертого десяткового знаку. Кожну наважку переносять в колбу та розчиняють у 20 см³ теплої етилового спирту з об'ємною часткою 10 %. Приготовлені розчини диметилума броміду та дисульфінату натрію змішують у колбі та переносять у мірну колбу місткістю 100 см³, додають до мітки етиловий спирт з об'ємною часткою 10 %.

7.2.3.2. Приготування кислотного розчину - змішаного індикатора.

20 см³ основного розчину (п. 7.2.3.1) змішують у мірній колбі місткістю 500 см³ з 200 см³ дистильованої води. Додають 20 см³ розчину сірчаної кислоти молярної концентрації $C_{(H_2SO_4)}=2,5$ моль/дм³, доводять водою до мітки та ретельно перемішують.

7.2.4. Приготування розчину гіаміну 1622 молярної концентрації $C_{(C_{12}H_{25}NO_4S)}=0,004$ моль/дм³.

Зважують 1,864 г гіаміну 1622. Результат зважування в грамах записують з точністю до четвертого десяткового знаку. Наважку кількісно переносять у мірну колбу місткістю 1 дм³, розчиняють у дистильованій воді, доводять до мітки та ретельно перемішують.

7.2.5. Приготування розчину лаурилсульфату натрію молярної концентрації $C_{(C_{12}H_{25}NO_4S)}=0,004$ моль/дм³ та визначення коефіцієнта поправки.

7.2.5.1. Зважують (1,14-1,16) г лаурилсульфату натрію. Результат зважування в грамах записують з точністю до четвертого десяткового знаку. Наважку кількісно переносять в колбу та розчиняють у 200 см³ дистильованої води. Приготовлений розчин переносять у мірну колбу місткістю 1 дм³, доводять дистильованою водою до мітки, ретельно перемішують.

7.2.5.2. Для визначення коефіцієнта поправки розчину лаурилсульфату натрію 20 см³ розчину гіаміну 1622 змішують у колбу для титрування, додають 10 см³ дистильованої води, 15 см³ хлороформу, 10 см³ змішаного індикатора та титрують розчином лаурилсульфату натрію, енергійно струшуючи закрити пробкою колбу для титрування після кожного додавання титранту. Натрієві іонні титрування реактив потрібно додавати краплями. Титрування продовжують до повного переведення синього забарвлення хлороформного шару в фіолетово-рожеве.

7.2.5.3. Коефіцієнт поправки розчину лаурилсульфату натрію обчислюють за формулою:

«Бланідас Активу» розчином лаурилсульфату натрію в присутності змішаного індикатора. В якості змішаного індикатора використовуються розчини димлідіуму броміду та дисульфінного голубого.

Діапазон вимірювання – 0,02-0,20%.

8.2. Засоби вимірювальної техніки, допоміжні матеріали та реактиви.

- Терези лабораторні загального призначення 2-го класу точності з найбільшою межею зважування 200 г згідно ГОСТ 24104.
- Навір наважок Г-2-210 згідно ГОСТ 7328
- Бюретка І-3-2-25-0,1 згідно ГОСТ 29251
- Піпетка І-2-10(20) згідно ГОСТ 29169
- Колби І-100(500)(1000)-2 згідно ГОСТ 1770
- Колби П-2-1000-42 ТХС згідно ГОСТ 25336
- Циліндри І-25(100)-2 згідно ГОСТ 1770
- Колби Кч-1-250-29/32 ТС згідно ГОСТ 25336
- Стакани В-150(250)(500) ТХС згідно ГОСТ 25336
- Лійки В-36-80 ХС згідно ГОСТ 25336
- Кислота сірчана згідно ГОСТ 4204, ч.д.а., розчин молярної концентрації $C_{(H_2SO_4)}=2,5$ моль/л
- Фенолфталеїн згідно ГОСТ 5850, ч.д.а., спиртовий розчин з масовою часткою 1%
- Лаурилсульфат натрію (натрій додецилсульфат) $CH_3(CH_2)_{11}OSO_3Na$, індекс 1.12533.0050, розчин молярної концентрації $C_{(C_{12}H_{25}NaO_4)}=0,004$ моль/л
- Гіамін 1622 (бензотоніум хлорид), індекс 1.12058.0250, спеціально очищений, розчин молярної концентрації $C_{(C_{12}H_{25}NClO_2)}=0,004$ моль/л
- Змішаний індикатор, розчин суміші барвників:
- Дисульфінний голубий, VN150, індекс кольору 12144.0055
- Димлідіум бромід, індекс кольору 12130.0001
- Хлороформ згідно ГОСТ 20015
- Спирт етиловий ректифікований згідно ГОСТ 18300 та розчин з об'ємною часткою 10%
- Вода дистильована згідно ГОСТ 6709
- Електролітика закритого типу згідно ГОСТ 14919

8.3. Підготовка до впробування.

8.3.1. Приготування розчину сірчаної кислоти молярної концентрації $C_{(H_2SO_4)}=2,5$ моль/л. За допомогою циліндру вимірюють 72,5 см³ концентрованої сірчаної кислоти та обережно, при перемішуванні, вливають в мірну колбу 700-800 см³ дистильованої води, охолоджують, доводять об'єм розчину водою до 1 дм³.

8.3.2. Приготування спиртового розчину фенолфталеїну з масовою часткою 1%.

Зважують 1,0 г фенолфталеїну. Результат зважування записують з точністю до другого десяткового знаку. Наважку переносять в колбу, розчиняють у 80 см³ етилового спирту та доводять об'єм розчину дистильованою водою до 100 см³.

8.3.3. Приготування розчину змішаного індикатора.

8.4. Приготування основного розчину.

Зважують 0,200 г димлідіума броміду та 0,100 г дисульфінного блакитного. Результати зважування записують з точністю до четвертого десяткового знаку. Кожну наважку переносять в колбу та розчиняють у 20 см³ теплої етилової спирту з об'ємною часткою 10%. Приготовлені розчини димлідіума броміду та дисульфінного голубого змішують у колбі та кількісно переносять у мірну колбу місткістю 100 см³, доводять до мітки етиловий спирт з об'ємною часткою 10%.

8.4.1. Приготування кислотного розчину – змішаного індикатора.

20 см³ основного розчину (п. 3.3.1) змішують у мірній колбі місткістю 500 см³ з 200 см³ дистильованої води. Додають 20 см³ розчину сірчаної кислоти молярної концентрації $C_{(H_2SO_4)}=2,5$ моль/л, доводять водою до мітки та ретельно перемішують.

8.4.2. Приготування розчину гіаміну 1622 молярної концентрації $C_{(C_{12}H_{25}NClO_2)}=0,004$ моль/л.

$$f = \frac{X_1 \cdot m_1 \cdot 125}{V_1 \cdot M_1} \quad [1]$$

де X_1 – масова частка основної речовини в гіаміні 1622, %;

m_1 – маса наважки гіаміну 1622, г;

V_1 – об'єм розчину лаурилсульфату натрію, витраченого на титрування аліквоги гіаміну 1622, см³;

M_1 – молекулярна маса гіаміну 1622, г/моль;

125 – поправочний коефіцієнт.

7.2.5.4. За результат коефіцієнту поправки розчину лаурилсульфату натрію приймають

середнє арифметичне результатів трьох паралельних випробувань, за винятком результату першого титрування.

7.3. Виконання випробування

1 г засобу «Бланідас Актив (Blanidas® Active)» зважують з похибкою не більше, ніж 0,0002 г. Результат зважування у грамах записують з точністю до четвертого десяткового знаку. Наважку кількісно переносять у мірну колбу місткістю 500 см³, доводять до мітки дистильованою водою та ретельно перемішують. Відбирають за допомогою піпетки 20 см³ цього розчину у колбу для титрування, додають 10 см³ дистильованої води, 15 см³ хлороформу та 10 см³ змішаного індикатора та титрують розчином лаурилсульфату натрію, додаючи його порціями по 1 см³ та енергійно струшуючи після додавання кожної порції. Наприкінці титрування реактив потрібно додавати краплями.

Титрування продовжують до повного зникнення синього забарвлення. При надлишку титранту хлороформний шар набуває рожевого забарвлення.

7.4. Опрацювання результатів вимірювання

7.4.1. Масову частку четвертинних амонійних сполук (X) у відсотках розраховують за формулою:

$$X = \frac{V \cdot f \cdot M}{m \cdot 125} \quad [2]$$

де f – коефіцієнт поправки розчину лаурилсульфату натрію;

де V – об'єм розчину лаурилсульфату натрію, витрачений на титрування проби, см³;

m – маса наважки засобу «Бланідас Актив», г;

M – середня молекулярна маса ЧАСів у засобі «Бланідас Актив (Blanidas® Active)» 320 г/моль;

125 – поправочний коефіцієнт.

За остаточної результат приймають середнє арифметичне значення результатів не менше трьох паралельних вимірювань, допустима розбіжність між якими не перевершує 1 % абс.

7.4.2. Абсолютну розбіжність d_a у відсотках результатів трьох паралельних визначень обчислюють за формулою:

$$d_a = X_1 - X_2 \quad [3]$$

де X_1 – більший за абсолютним значенням результат із трьох паралельних визначень;

X_2 – менший за абсолютним значенням результат із трьох паралельних визначень.

8. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ АЛКІЛДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМОНІЮ ХЛОРИДУ В РОБОЧОМУ РОЗЧИНІ «БЛАНІДАС АКТИВ (BLANIDAS® ACTIVE)»

8.1. Метод вимірювання.

Застосований метод поширюється на дезінфікуючий засіб «Бланідас Актив» і встановлене визначення масової частки алкілдиметилбензиламонію хлориду в робочому розчині «Бланідас Активу». Метод базується на двофазному титруванні робочого розчину

Зважують 1,864 г гіаміну 1622. Результат зважування в грамах записують з точністю до четвертого десяткового знаку. Наважку кількісно переносять у мірну колбу місткістю 1 дм³, розчиняють у дистильованій воді, доводять до мітки та ретельно перемішують.

8.4.3. Приготування розчину лаурилсульфату натрію молярної концентрації $C_{\text{дистильована}} = 0,004$ моль/л та визначення коефіцієнта поправки.

Зважують (1,14-1,16) г лаурилсульфату натрію. Результат зважування в грамах записують з точністю до четвертого десяткового знаку. Наважку кількісно переносять в колбу та розчиняють у 200 см³ дистильованої води. Приготовлений розчин кількісно переносять у мірну колбу місткістю 1 дм³, розводять дистильованою водою до мітки, ретельно перемішують.

Для визначення коефіцієнта поправки розчин лаурилсульфату натрію 20 см³ розчину гіаміну 1622 вміщують у колбу для титрування, додають 10 см³ дистильованої води, 15 см³ хлороформу, 10 см³ змішаного індикатора та титрують розчином лаурилсульфату натрію, енергійно струшуючи закриту пробкою колбу для титрування після кожного додавання титранту. Наприкінці титрування реактив потрібно додавати краплями. Титрування продовжують до повного переведення синього забарвлення хлороформного шару в фіолетово-рожеве.

Коефіцієнт поправки розчину лаурилсульфату натрію обчислюють за формулою:

$$K = \frac{X_1 \times n_1}{V_1 \times M_1} \times 0,02, \quad [11]$$

де X_1 – масова частка основної речовини в гіаміні 1622, %;

n_1 – маса наважки гіаміну 1622, г;

V_1 – об'єм розчину лаурилсульфату натрію, витраченого на титрування аліквоти гіаміну 1622, см³;

M_1 – молекулярна маса гіаміну 1622 рівна 466 г/моль.

За результат коефіцієнту поправки розчину лаурилсульфату натрію приймають середнє арифметичне результатів трьох паралельних випробувань, за винятком результату першого титрування.

8.5. Виконання випробування.

В колбу для титрування відбирають 20 см³ робочого розчину Біанілас Активу (V_2), додають 10 см³ дистильованої води, 15 см³ хлороформу та 10 см³ змішаного індикатора та титрують розчином лаурилсульфату натрію, додаючи його порціями по 1 см³ та енергійно струшуючи після додавання кожної порції. Наприкінці титрування реактив потрібно додавати краплями.

Титрування продовжують до повного зникнення синього забарвлення. При надлишку титранту хлороформний шар набуває рожевого забарвлення.

8.6. Опрацювання результатів вимірювання

Масову частку алкідиметилбензиламонію хлориду (X) у відсотках розраховують за формулою:

$$X = \frac{V_3 \times C \times M \times K}{10 \times V_1}$$

де K – коефіцієнт поправки розчину лаурилсульфату натрію;

де V_3 – об'єм розчину лаурилсульфату натрію, витрачений на титрування проби, мл;

V_1 – об'єм робочого розчину «Біанілас Активу», взятий до аналізу, см³;

M – молекулярна маса алкідиметилбензиламонію хлористого, рівна 370 г/моль;

C – молярна концентрація лаурилсульфату натрію моль/дм³.

За остаточної результат приймають середнє арифметичне значення результатів не менше трьох паралельних вимірювань, допустима розбіжність між якими не перевершує 0,001% абс.



Процесуєровано
та проаналізовано
36 аркушів

Директор
«Діагностика м'яса»
Кісільов С. А.